
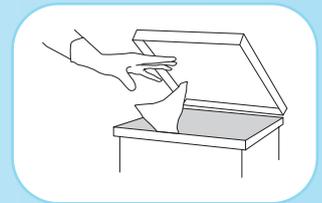


COMMENT UTILISER LES LINGETTES clinell® UNIVERSAL WIPES

CLINELL® UNIVERSAL WIPES

Portez si nécessaire des gants et retirez une lingette de l'emballage. Travaillez depuis la surface propre vers la surface sale, en effectuant un mouvement en forme de S. Ne passez pas 2x sur la même zone. Jetez toujours la lingette dans le récipient adapté. Laissez sécher à l'air le matériel désinfecté et nettoyé.

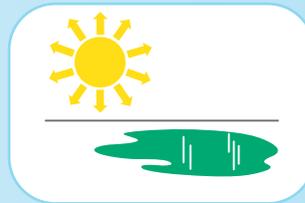


Placez le paquet de lingettes sur le côté avec l'ouverture vers l'avant.
De cette façon, les lingettes resteront humides uniformément.

* Si la surface/l'instrument est souillé avec du **sang** ou un **liquide organique**, des **gants** doivent être portés comme équipement de protection individuelle après avoir jeté la lingette, les gants sont également retirés et l'hygiène des mains est appliquée pour le produit lui-même il ne faut pas porter de gants.



Comment remplir le distributeur

1. Sortir l'emballage de la boîte.
2. Appuyez sur l'emballage pour répartir le liquide uniformément.
3. Placer l'emballage sur le côté dans le support avec le couvercle ouvrant vers l'extérieur.

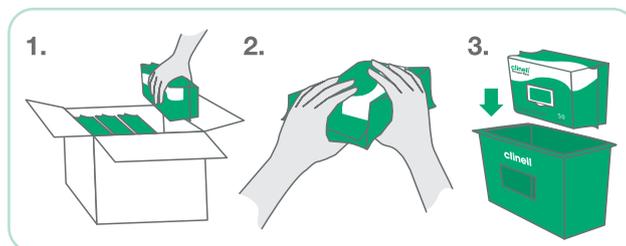

Il est recommandé de placer l'emballage CW200 dans un support afin d'obtenir un fonctionnement optimal et stable (l'humidité sera répartie uniformément de cette manière et gardera toutes les lingettes également humides).




Chaque support mural pour les lingettes est fourni avec les 4 autocollants :

- Les applications (placé sur le côté)
- Le mode d'emploi (placé sur le côté)
- Pas une lingette pour bébé (placé à l'avant)
- Ne pas jeter dans les WC (placé à l'avant)

clinell®



Mode d'emploi des Lingettes

Portez – si nécessaire – des gants pour extraire une lingette de l'emballage. Travaillez depuis la surface propre vers la surface sale en effectuant un mouvement en forme de S. Ne passez pas 2 fois sur la même zone. Jetez toujours la lingette dans le récipient adapté. Faites sécher à l'air le matériel nettoyé et désinfecté.

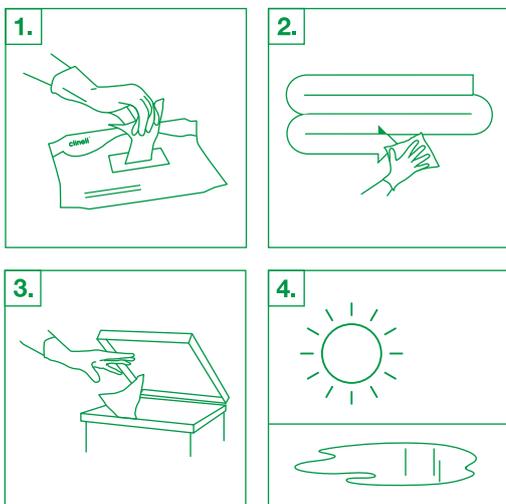

JBN210717

Les équipements / surfaces suivant(e)s doivent régulièrement être nettoyé(e)s et désinfecté(e)s avec ces lingettes: (quelques exemples; la liste n'est pas exhaustive)

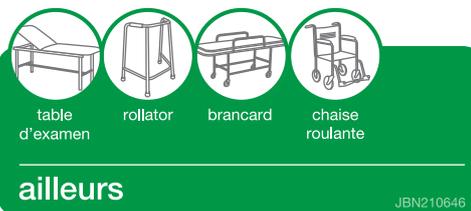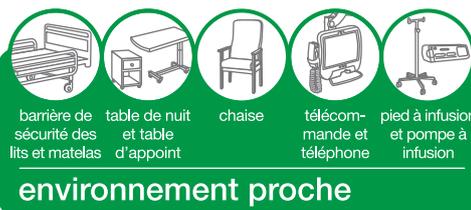

JBN210646

